



FreezPen® on kompakti ja helppokäyttöinen cryokirurgian instrumentti hyvälaatuisten ihovaurioiden (syylät, luomet, pigmenttimuutokset jne.) korjaamiseen, joiden halkaisija on noin 2-8mm. Kynän sisälle asetetaan N₂O patruuna ja filtteri, minkä jälkeen se on jo käyttövalmis. Virtaus tulee 50-55 bar paineella ja on -89°C. FreezPen® vaatii 3-40 sekuntia käsittelyä tehokkaan tuloksen aikaansaamiseksi, hoito ulottuu enintään 5mm syvyyteen asti. FreezPenin tarkka ja pieni toimintasäde rajoittaa terveen ihon turhaa käsittelyä, minimoi epämukavuuden ja lyhentää hoitosarjojen väliin jätettävää aikaa.

Taulukko patruunojen kestosta:

	Freezpen 8g	Freezpen 16g	Lesion size
Blue	110-140 s	250-280 s	1-3 mm
White	80-100 s	180-210 s	2-6 mm
Green		145-165 s	4-8 mm



[FreezPen - Precision Cryotherapy -video käyttökohteista ja tuloksista](#)

[Prepare your FreezPen for treatment -video laitteen käyttöönotosta](#)